

必ずご使用前にお読みください

取扱説明書

オーイーダブルマットレス

このたびはオーイーダブルマットレスをお買い上げまたはレンタルいただきまことにありがとうございます。この「取扱説明書」にはオーイーダブルマットレスを安全にお使いいただくための注意事項や使用方法などを記載しています。

- オーイーダブルマットレスをお使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- このマットレスを使用される方だけでなく、付き添いの方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してください。
- 製品を他に譲渡される場合は、この「取扱説明書」も一緒にお渡しください。
- お買い上げまたはレンタルの製品は、改良などによりこの「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

＜ 販売店または専門業者の方へのお願い ＞
この「取扱説明書」は必ず療養される方か介護される方へお渡しください。

安全に使用するための注意事項

- ご使用前にこの「安全に使用するための注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- この「安全に使用するための注意事項」は製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- この「安全に使用するための注意事項」は必ず守ってください。

警告

この表示の内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・麻痺など)を負う可能性があることを示します。

注意

この表示の内容を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷(打撲・すり傷・きり傷など)を負う可能性や物的損害が発生する可能性があることを示します。

安全上の注意

⚠ 警告

●他社製品及び指定適合周辺機器以外とは組み合わせないでください。

指定以外の製品と組み合わせると、破損やケガの原因になります。

●体の挟み込みに注意してください。

サイドガードや介助バーと合わせてご使用される際には、マットレス・ベッドとのすき間に体が挟まれないようにご注意ください。挟まれてケガをしたり、圧迫による窒息の可能性があります。

●チューブ・ドレーン類の挟み込みに注意してください。

サイドガードや介助バーと合わせてご使用される際には、マットレス・ベッドとのすき間にチューブ・ドレーン類が挟まれないようにご注意ください。抜けたり、つぶれたりする可能性があります。

●サイドガード・介助バー使用時もベッドからの転落に注意してください。

サイドガードや介助バーなどの上から体を乗り出して転落するなどのケガをする可能性があります。

●人や物が乗った状態のままで移動させないでください。

マットレスを移動する際は、人や重い物が乗っていない状態で移動してください。乗ったまま移動すると人や物が転落しケガをしたり、詰め物や表生地が破損する原因になります。

●乳幼児には使用しないでください。

サイドガードや介助バーとマットレス・ベッドとのすき間に体が挟まれてケガをしたり、圧迫による窒息の可能性があります。

●火気又は温度の高いものに近づけないでください。

マットレスの近くで暖房器具などの熱器具を使用しないでください。変形・変質・発火などの原因になります。

●マットレスの上での喫煙はおやめください。

火災の原因になります。

●お客様による修理・改造はしないでください。

破損してケガの原因になります。

⚠ 注意

●マットレスの上で敷き布団を使用しないでください。

すべてで転倒・転落しケガをする可能性や、サイドガードや介助バーとベッドなどに干渉し故障の原因になります。

●マットレスを設置する際は、ベッド上に障害物がないことを確認してください。

破損の原因になります。また突起物のない平らな場所に設置してください。

●マットレスの上で飛び跳ねたり立ち上がらないでください。

変形・破損やケガの原因になります。

●マットレスの上でハサミ・ナイフ等の突起物の使用は避けてください。

破損やケガの原因になります。

●経年劣化により著しく変形・へたりが発生したときは使用をおやめください。

破損やケガの原因になります。

使用上の注意

注意

●このマットレスは表・裏があります。

定期的に頭・脚側の向きを変えてご使用ください。
マットレスを平均的に使うことで長持ちさせることができます。

●マットレスはベッドの上に直接敷いてご使用ください。

●マットレスは2枚以上重ねて使用しないでください。

●マットレスの上面には必ずベッドパッドやシーツを敷いてご使用ください。

●厚手の敷物を敷かないでください。

このマットレスの上に体圧分散を妨げるような厚手の敷物を敷かないでください。

●マットレスを無理に折り曲げないでください。

変形・破損の原因になります。

●表生地を洗濯するとき以外は、表生地を取り外さないでください。

ファスナーが破損する可能性があります。また使用中もファスナーを開けて使用しないでください。

●直射日光やエアコンなどの風を直接当てないでください。

変形・変質・変色などの原因になります。

●高温・多湿な場所の設置は避けてください。

高温・多湿な場所は避け、湿気がこもらないよう壁から5 cm以上離して設置してください。

●新しいうちは素材の臭いがする場合があります。

臭いが気になる場合は、風通しのよい所で陰干ししておくことで臭いを低減することができます。

●シンナー・ベンジン・漂白剤などは使用しないでください。

シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ物及び漂白剤の使用は、生地を傷める原因になります。

●素材によっては使用しているうちにへたりや黄変が発生することがあります。

●背上げた状態で長時間使用されると、使用状況により劣化を早める恐れがあります。

お手入れ

●ほこりを払う際は電気掃除機や洋服ブラシをご使用ください。

マットレスを叩くと中の詰め物を傷める恐れがあります。

●表生地は取り外して洗えます。

表生地にはファスナーが付いていますので、表生地だけを取り外し洗濯することができます。洗濯の際は洗濯の表示を守ってください。

●洗濯をすると若干色が変わる場合があります。

●定期的に風通しのよい場所に陰干ししてください。

カビ・臭い等を防ぐために時々寝装品を取り除き、風通しのよい場所で陰干しをしてください。

仕様

品名	オーイーダブルマットレス		
寸法 幅×長さ×厚さ	幅:約 910 × 長さ:約 1910 × 厚さ: 約 80 mm		
製品重量	約5.0kg		
材質	表生地	ポリエステル 100%	
	詰物	ポリエステル 100%	

長期保管について

長期間マットレスをご使用されないときは以下にご注意ください。

●マットレス以外のものを重ねて載せないでください。

●高温・多湿・ほこりの多い場所・直射日光を避けてください。

表生地・詰物の変色する場合がありますが、製品の性能に問題はありません。
臭いが気になる場合は、風通しのよい日陰に1日放置しておくことで臭いを低減することができます。

アフターサービス

修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき再度ご確認ください。

商品品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら
販売店・レンタル業者または弊社までご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

- 品名・型番
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- お名前・ご住所・お電話番号

株式会社グランツ

フリーダイヤル

☎ 0120-78-0069

営業時間 : 平日9:00~18:00(土曜日のみ17:00迄)

休業 : 日曜・祝日・第2.4.5土曜日

〒573-0102 大阪府枚方市長尾家具町2丁目5番5